

EXIGENCES DE L'ENVIRONNEMENT SYSTÈME

Traduit du document maître: PC-007 System Environment Requirements
Rev.9_EN

Numéro de document : PC-007 Exigences de l'environnement système Rev.9_FR

Date de révision : 03/05/2024



Table des matières

1	INFORMATION GÉNÉRALE	3
1.1	AVERTISSEMENT	3
2	COMBINAISONS DE SYSTÈME VALIDÉES	4
2.1	STATIONS DE TRAVAIL	4
2.2	POSTES DE TRAVAIL	4
2.3	SERVEURS D'APPLICATIONS	5
2.4	SERVEURS D'APPLICATIONS VIRTUELS.....	5
2.5	SERVEUR D'APPLICATIONS CLIENT	6
2.6	MICROSOFT AZURE	6
3	ASSISTANCE	7
3.1	INFORMATION DU FABRIQUANT.....	7
3.2	REPRÉSENTANTS	7
3.3	FILIALES.....	7

1 INFORMATION GÉNÉRALE

Les logiciels d'Hermes Medical Solutions ont été vérifiés sur des systèmes utilisant les spécifications décrites dans ce document. Pour toutes questions concernant d'autres combinaisons, veuillez contacter le service de support technique, voir la section *Assistance*.

En ce qui concerne notre logiciel de reconstruction. Des exigences spécifiques à celui-ci sont décrites dans des colonnes séparées et remplacent les exigences générales.

Hermes Medical Solutions accepte volontiers les commentaires des lecteurs de ce manuel. S'il vous plaît, veuillez nous rapporter toute erreur de contenu ou de typographie, ainsi que les suggestions d'amélioration à notre service de support, voir la section *Assistance*.

NOTE : Il est de la responsabilité du client d'installer et de maintenir à jour un logiciel anti-virus sur le serveur et les ordinateurs client, ainsi que d'appliquer la protection nécessaire contre des menaces potentielles.

1.1 Avertissement



Only properly trained service personnel of Hermes Medical Solutions, or an authorized dealer, shall perform installations, and service of this product.
Seul le personnel de service formé par Hermes Medical Solutions, ou un détaillant autorisé, peut effectuer l'installation, la configuration et le service de ce produit.



No other than Hermes Medical Solutions approved applications shall be installed on the computer device for which Hermes Medical Solutions applications are intended to be used. Use of other applications may result in impaired performance and, in the worst case, incorrect output data.
Aucune autre application que celles approuvées par Hermes Medical Solutions ne doivent être installées sur l'ordinateur sur lequel il est prévu d'utiliser les applications de Hermes Medical Solutions. L'utilisation d'autres applications peut entraîner une diminution de la performance et, dans le pire des cas, des résultats de données erronées.

2 COMBINAISONS DE SYSTÈME VALIDÉES

Pour tous nos produits – logiciel de licences Hermes: ExplorerPWD V4.6.2 ou plus récent.
Toutes les cartes graphiques (GPU) mentionnées ci-dessous proviennent de NVIDIA®.

2.1 Stations de travail

Système d'opération	Carte graphique	Résolution	Moniteur multiple	Exigences spécifiques au logiciel de reconstruction
Microsoft® Windows 11 (64bit)	RTX™ A2000 (4GB 8GB)	1920 x 1080@60Hz	N/A	RTX™ A2000 (4GB 8GB) Taille et affichage: 100% (ne pas augmenter) Branche du pilote R535 (au moins U2)
	Quadro® Tx000	1920 x 1080@60Hz	N/A	Quadro® T1000/T2000 Taille et affichage: 100% (ne pas augmenter) Branche du pilote R535 (au moins U2)
Microsoft® Windows 10 (64bit)	RTX™ A2000 (4GB 8GB)	1920 x 1080@60Hz	N/A	RTX™ A2000 (4GB 8GB) Taille et affichage: 100% (ne pas augmenter) Branche du pilote R535 (au moins U2)
	Quadro® Tx000	1920 x 1080@60Hz	N/A	Quadro® T1000/T2000 Taille et affichage: 100% (ne pas augmenter) Branche du pilote R525 (au moins U7)

CPU : Intel®

RAM : Minimum 16GB

2.2 Postes de travail

Système d'opération	Carte graphique	Résolution	Moniteur multiple	Exigences spécifiques au logiciel de reconstruction
Microsoft® Windows 11 (64bit)	RTX™ Ax000	1920 x 1200@60Hz*	Nombre maximal testé de moniteurs en affichage multiple: 2 moniteurs ayant une résolution de 1920x1200@60Hz	RTX™ A2000 (6GB 12GB) Taille et affichage: 100% (ne pas augmenter) Branche du pilote R535 (au moins U2)
Microsoft® Windows 10 (64bit)	RTX™ A2000 (6GB 12GB)Quadro® Px000/Px200-series	1920 x 1200@60Hz*	Nombre maximal testé de moniteurs en affichage multiple: 2 moniteurs ayant une résolution de 1920x1200@60Hz	RTX™ A2000 (6GB 12GB) Taille et affichage: 100% (ne pas augmenter) Branche du pilote R525 (au moins U7)
	Quadro® Px000/Px200-series	1920 x 1200@60Hz*	Nombre maximal testé de moniteurs en affichage multiple: 2 moniteurs ayant une résolution de 1920x1200@60Hz	Quadro® P2000/P2200 Taille et affichage: 100% (ne pas augmenter) Branche du pilote R525 (au moins U7)

* Maximum testé: 2560x1400@60Hz

CPU: Intel®

RAM: Minimum 16GB

2.3 Serveurs d'applications

Système d'opération	Carte graphique	Exigences spécifiques au logiciel de reconstruction
Microsoft® Server 2019	L4	L4 Branche du pilote 16 (au moins 16.1)
	Quadro® RTX™ x000	Quadro RTX™ 4000 Branche du pilote R525 (au moins U7)
Microsoft® Server 2016	Quadro® RTX™ x000	Quadro RTX™ 4000 Branche du pilote R470 (au moins U12)
	Quadro® Px000-series	Quadro® P4000/P5000 Branche du pilote R470 (au moins U12)

CPU : Intel®

RAM : Minimum 64GB

Citrix VDA : Citrix Virtual Apps 7 1912 LTSR (au moins CU6)
Citrix Virtual Apps 7 2203 LTSR (au moins CU2) (recommandé)

RDS : Se référer au système d'Opération Windows Server ci-dessus.

2.4 Serveurs d'applications virtuels

<i>Alternative 1</i>	
Système d'opération	Microsoft® Server 2019
Carte graphique	NVIDIA® L4
Hyperviseur	VMWare vSphere Enterprise edition version 8.0 mise-à-jour 2 vCenter Server version 8.0 mise-à-jour 2
RAM	64GB
Version du Pilote	Logiciel NVIDIA vGPU Version 16 (au moins patch 2)
Citrix VDA	Citrix Virtual Apps 7 2203 LTSR (au moins CU2) (recommandé)

<i>Alternative 2</i>	
Système d'opération	Microsoft® Server 2016
Carte graphique	NVIDIA® Tesla® P100-16Q
Hyperviseur	VMWare vSphere Enterprise edition version 7.03G vCenter Server version 7.03G
RAM	64GB
Version du Pilote	Logiciel NVIDIA vGPU Version 13 (au moins patch 7)
Citrix VDA	Citrix Virtual Apps 7 1912 LTSR (au moins CU6) Citrix Virtual Apps 7 2203 LTSR (au moins CU2) (recommandé)

2.5 Serveur d'applications client

Résolutions du moniteur : Résolution maximale testée: 1920x1200@60Hz

Accès à distance : Citrix Workspace app 1912 LTSR (au moins CU6)
Citrix Workspace app 2203 LTSR (au moins CU2) (recommandé)
RDP Client Windows 10/11 (dernière version recommandée)

Vitesse du réseau : Minimum 100 Mbps (recommandé 1Gbps)

2.6 Microsoft Azure

<i>Alternative 1</i>	
Système d'opération	Microsoft® Server 2019
Carte graphique	NVIDIA® T4
Version du Pilote	Logiciel NVIDIA vGPU Version 16 (au moins patch 1)
Virtual Machine	NCasT4_v3-series
Accès à distance	Microsoft RemoteApp

NOTE: Pour la licence, Corridor4DM requière une machine virtuelle dédiée et la suite Cardiaque Cedars-Sinai requière une machine virtuelle dédiée ou une connexion internet sortante.

3 ASSISTANCE

Contactez l'une des adresses ci-dessous pour le service, le support ou si vous avez toutes autres questions.

3.1 Information du fabricant

**Siège social****Hermes Medical Solutions AB**

Strandbergsgatan 16
112 51 Stockholm
SWEDEN
Tél : +46 (0) 819 03 25
www.hermesmedical.com

Courriel général :

info@hermesmedical.com

Courriel du support :

support@hermesmedical.com
support.ca@hermesmedical.com
support.us@hermesmedical.com

3.2 Représentants

Représentants autorisés**Personne responsable au Royaume-Uni**

Hermes Medical Solutions Ltd
Cardinal House
46 St. Nicholas Street
Ipswich, IP1 1TT
England, United Kingdom

Représentant autorisé en Suisse

CMI-experts
Grellinger Str. 40
4052 Basel
Switzerland

CH	REP
----	-----

3.3 Filiales

Hermes Medical Solutions Ltd

York Suite, 7-8 Henrietta Street
Covent Garden
London WC2E 8PS
UK
Tél : +44 (0) 20 7839 2513

Hermes Medical Solutions, Inc

710 Cromwell Drive, Suite A
Greenville, NC27858
USA
Tél : +1 (866) 437-6372
Fax : +1 (252) 355-4381

Hermes Medical Solutions Canada, Inc

1155, René-Lévesque O., Suite 2500
Montréal (QC) H3B 2K4
Canada
Tél : +1 (877) 666-5675
Fax : +1 (514) 288-1430

Hermes Medical Solutions Germany GmbH

Robertstraße 4
48282 Emsdetten
Deutschland
Tél : +46 (0)819 03 25