

HERMIA



NOTES DE MISE À JOUR

OLINDA/EXM[®] 2.4.0



Nom du document : P58-085 Notes de mise à jour OLINDA EXM 2.4.0 Rev.1_FR

Traduit du document maître : P58-085 Release Notes OLINDA EXM 2.4.0 Rev.1_EN

Date de révision : 20/11/2024

Ces notes de mise à jour informent l'utilisateur des nouveautés et améliorations dans OLINDA EXM 2.4.0, ainsi que des problématiques connues à prendre en considération.

Ceci est un document électronique dont une copie peut être téléchargée à partir de www.hermesmedical.com/ifu. Des copies imprimées du modes d'emploi, des exigences de l'environnement système et des notes de mise à jour sont disponibles gratuitement sur demande (autant de copies que le nombre de licences achetées).

Les notes de mise à jour et le logiciel médical lui-même sont protégés par des droits d'auteur, et tous les droits sont réservés par Hermes Medical Solutions. Ni le logiciel, ni le manuel ne peuvent être de toute manière copié ou reproduit sans le consentement préalable écrit de Hermes Medical Solutions qui se réserve le droit d'y apporter des changements et améliorations au logiciel et au manuel à tout moment.

Hermes Medical Solutions*, HERMIA*, le logo HERMIA* et SUV SPECT* sont des marques déposées de Hermes Medical Solutions AB.

Les marques tierces utilisées ici sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, qui ne sont pas affiliés avec Hermes Medical Solutions.

* Sous réserve d'inscription dans certains marchés.

Table des matières

1	INTRODUCTION	3
1.1	DOCUMENTATION ASSOCIÉE	3
1.2	PLAINTES ET INCIDENTS SÉRIEUX	3
2	NOUVEAUTÉS ET AMÉLIORATIONS	4
2.1	NOUVELLES FONCTIONNALITÉS AJOUTÉES DANS OLINDA/EXM 2.4.0	4
2.2	PROBLÈMES RÉSOLUS ET AMÉLIORATIONS MINEURES DANS LA VERSION 2.4.0	4
3	PROBLÈMES CONNUS	5
4	ASSISTANCE	6
4.1	COORDONNÉES DU FABRICANT.....	6
4.2	REPRÉSENTANTS	6
4.3	FILIALES.....	6

1 INTRODUCTION

Ce document contient les notes de mise à jour publiques pour OLINDA/EXM® 2.4. Il fournit une liste des nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des correctifs apportés au logiciel depuis la dernière version.

Ce document inclut également les problèmes connus. Chaque utilisateur doit être familier avec ces problèmes connus. Contacter le fabricant pour toutes questions à propos du contenu.

1.1 Documentation associée

- P58-078 Mode d'emploi OLINDA EXM 2.4.0 Rev.1_FR

Le Mode d'Emploi contient l'information nécessaire de base pour configurer l'application selon vos préférences.

Le guide d'utilisateur, destiné à assister l'utilisateur dans l'utilisation du logiciel, est disponible à partir de la fonction *Help* dans le logiciel lui-même.

Les messages d'avertissement sont énumérés dans les instructions pour l'utilisation et dans le guide de l'utilisateur. Les messages d'avertissements décrivent clairement les utilisateurs prévus, les limitations dans le logiciel et les risques que peuvent entraîner les changements au logiciel.

1.2 Plaintes et incidents sérieux

Tout incident sérieux qui s'est produit en lien avec l'appareil doit être rapporté à notre support, voir la section *Assistance*.

Selon les réglementations applicables, il peut être nécessaire de rapporter aux autorités nationales les problèmes rencontrés. Pour l'Union Européenne, les incidents sérieux doivent être rapportés à l'autorité compétente de l'état membre de l'Union Européenne dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Hermes Medical Solutions accepte volontiers les commentaires des lecteurs de ce manuel. S'il vous plaît, veuillez nous signaler toutes erreurs de contenu et de typographie, ainsi que les suggestions d'amélioration à notre support, voir la section *Assistance*.

2 NOUVEAUTÉS ET AMÉLIORATIONS

2.1 Nouvelles fonctionnalités ajoutées dans OLINDA/EXM 2.4.0

L'ajout du support pour la licence *OpenApp*.

2.2 Problèmes résolus et améliorations mineures dans la version 2.4.0

Aucun problème n'a été résolu et aucune amélioration n'a été effectuée dans cette version.

3 PROBLÈMES CONNUS

Il n'y a pas de problèmes connus relatifs à la sécurité du patient dans cette version de OLINDA/EXM®.

Ci-dessous se retrouve une sélection de problèmes connus, toujours actifs et pertinents pour l'utilisateur.

Tous les problèmes mentionnés ci-dessous ont été analysés pour le risque et ont été classés comme acceptables.

- Le modèle sphérique de Olinda, avec la série de décroissance, montre seulement le dernier nucléide dans le rapport (# de cas 64702).
- Les organes gastrointestinaux sont mis à zéro de manière inattendue (# de cas 62536).
- Les ratios de ramification ne sont pas respectés dans la série de décroissance (# de cas 55257).
- La licence d'OLINDA (utilisation autonome) sera non fonctionnel (licence fixe) si vous utilisé un chemin d'installation personnalisé lors de l'installation (# de cas 45898).
- Le rapport de dose ne contient pas la liste des isotopes dans une série de décroissance lors de l'utilisation de OLINDA avec le modèle sphérique (# de cas 39146).
- La liste d'organe affichée n'est pas la même que celle obtenues dans les résultats lorsque la donnée est modifiée (# de cas 44215).
- La valeur de la cinétique dans le tableau pour la vessie n'est pas mise à jour correctement lors de l'utilisation du modèle de la vessie.
- Modifier une donnée ne fonctionne pas tel qu'attendu lors de l'utilisation du bouton *Apply*.

4 ASSISTANCE

Contactez l'une des adresses ci-dessous pour obtenir du service, du support ou si vous avez toutes autres questions.

4.1 Coordonnées du fabricant



Siège social
Hermes Medical Solutions AB
Strandbergsgatan 16
112 51 Stockholm
SWEDEN
Tél : +46 (0) 819 03 25
www.hermesmedical.com

Adresse courriel générale :
info@hermesmedical.com

Adresses courriels du support :
support@hermesmedical.com
support.ca@hermesmedical.com
support.us@hermesmedical.com

4.2 Représentants

Représentants autorisés

Personne responsable au Royaume-Uni
Hermes Medical Solutions Ltd
Cardinal House
46 St. Nicholas Street
Ipswich, IP1 1TT
England, United Kingdom

Représentant autorisé en Suisse

CH	REP
----	-----

CMI-experts
Grellinger Str. 40
4052 Basel
Switzerland

4.3 Filiales

Hermes Medical Solutions Ltd
7-8 Henrietta Street
Covent Garden
London WC2E 8PS, UK
Tél : +44 (0) 20 7839 2513

Hermes Medical Solutions, Inc
2120 E. Fire Tower Rd, #107-197
Greenville, NC27858
USA
Tél : +1 (866) 437-6372

Hermes Medical Solutions Canada, Inc
1155, René-Lévesque O., Suite 2500
Montréal (QC) H3B 2K4
Canada
Tél : +1 (877) 666-5675
Télécopieur : +1 (514) 288-1430

Hermes Medical Solutions Germany GmbH
Robertstraße 4
48282 Emsdetten
Deutschland
Tél : +46 (0)819 03 25