

HERMIA



# PRODUKTBEMÆRKNINGER

**OLINDA/EXM<sup>®</sup> 2.4.0**



**Dokumentnavn:** P58-085 Produktbemærkninger OLINDA EXM 2.4.0 Rev.1\_DK  
**Dokumentets revisionsdato:** 11/20/2024

Disse produktbemærkninger informerer brugerne om nyheder og forbedringer i OLINDA EXM 2.4.0 samt om eventuelle kendte problemer, de skal være opmærksomme på.

Dette er et elektronisk dokument, og en kopi af dette kan downloades fra [www.hermesmedical.com/ifu](http://www.hermesmedical.com/ifu). Papirudgaver af brugsanvisningen, systemmiljøkravene og produktbemærkningerne er gratis (svarende til antallet af købte licenser) og kan udleveres på anmodning.

Produktbemærkningerne og selve softwaren til det medicinske udstyr er beskyttet af ophavsret, og alle rettigheder forbeholdes Hermes Medical Solutions. Hverken softwaren eller manualen må kopieres eller på anden måde gengives uden forudgående skriftligt samtykke fra Hermes Medical Solutions, som forbeholder sig retten til at foretage ændringer og forbedringer af softwaren og manualen til enhver tid.

Hermes Medical Solutions\*, HERMIA\*, HERMIA-logotypen\* og SUV SPECT\* er varemærker tilhørende Hermes Medical Solutions AB.

Tredjepartsvaremærker som anvendt heri tilhører deres respektive ejere, som ikke er tilknyttet Hermes Medical Solutions.

\*Med forbehold for registrering på nogle markeder

## Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>INTRODUKTION .....</b>	<b>3</b>
1.1	TILKNYTTET DOKUMENTATION .....	3
1.2	KLAGER OG ALVORLIGE HÆNDELSER .....	3
<b>2</b>	<b>NYHEDER OG FORBEDRINGER .....</b>	<b>4</b>
2.1	NYE FUNKTIONER IMPLEMENTERET I OLINDA/EXM 2.4.0.....	4
2.2	PROBLEMRRETTELSER OG MINDRE FORBEDRINGER FORETAGET I VERSION 2.4.0 .....	4
<b>3</b>	<b>KENDTE PROBLEMER .....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>KONTAKTOPLYSNINGER .....</b>	<b>6</b>
4.1	PRODUCENTENS KONTAKTOPLYSNINGER .....	6
4.2	REPRÆSENTANTER.....	6
4.3	DATTERSELSKABER.....	6

# 1 INTRODUKTION

Dette dokument indeholder de offentlige produktbemærkninger til OLINDA/EXM® 2.4. Det indeholder en liste over nye funktioner, forbedringer og fejlrettelser siden sidste udgivelse.

Dokumentet indeholder desuden kendte problemer. Alle brugere bør kende disse kendte problemer. Kontakt producenten, hvis du har spørgsmål til indholdet.

## 1.1 Tilknyttet dokumentation

- P58-078 Brugsanvisning OLINDA 2.4.0 Rev.1

Brugsanvisningen indeholder de nødvendige grundlæggende oplysninger til at konfigurere applikationen efter dine egne præferencer.

En brugervejledning i softwaren er tilgængelig fra hjælpefunktionen i selve softwaren.

Advarselsmeddelelser er nu angivet i både brugsanvisningen og brugervejledningen. Advarselsmeddelelserne beskriver tydeligt tilsigtede brugere, begrænsninger i softwaren og risikoen ved at foretage ændringer i softwaren.

## 1.2 Klager og alvorlige hændelser

Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med udstyret, skal indberettes til vores support, se Kontaktoplysninger.

Afhængigt af gældende regler kan det også være nødvendigt at indberette alvorlige hændelser til de nationale myndigheder. I Den Europæiske Union skal alvorlige hændelser indberettes til den kompetente myndighed i den EU-medlemsstat, som brugeren og/eller patienten tilhører.

Hermes Medical Solutions modtager gerne feedback fra brugerne af softwaren og læserne af dette dokument. Rapport eventuelle fejl og forslag til forbedringer i softwaren og i indholdet eller typografien i dette dokument, se Kontaktoplysninger.

## **2 NYHEDER OG FORBEDRINGER**

### **2.1 Nye funktioner implementeret i OLINDA/EXM 2.4.0**

Tilføjet understøttelse af OpenApps-licens.

### **2.2 Problemrettelser og mindre forbedringer foretaget i version 2.4.0**

Der er ikke foretaget fejlrettelser eller forbedringer i denne version.

### 3 KENDTE PROBLEMER

Der er ingen kendte problemer relateret til patientsikkerhed i denne version af OLINDA/EXM®.

Nedenfor er et udvalg af åbne kendte problemer, der er relevante for slutbrugerne. Alle problemer er blevet risikoanalyseret og er blevet klassificeret som acceptable.

- Olinda-kuglemodel med henfaldsserie viser kun sidste nuklid i rapport (sag nr. 64702)
- GI-organer er uventet angivet til nul (sag nr. 62536)
- Forgreningsforhold respekteres ikke i henfaldsserier (sag nr. 55257)
- OLINDA (enkeltstående) licenseres ikke (nodelås), hvis du installerer via brugerdefineret installationssti under installationen (sag nr. 45898).
- Dosisrapport indeholder ikke listen over isotoper i en henfaldsserie, når OLINDA-kuglemodellen anvendes (sag nr. 39146).
- Den viste organliste er ikke den samme som den, der vises i resultaterne, når data modificeres (sag nr. 44215).
- Den kinetiske tabelværdi for urinblæren opdateres ikke korrekt, når blæretømningsmodellen anvendes.
- Modify data [modificer data] fungerer ikke som forventet, når knappen Apply [anvend] bruges.

## 4 KONTAKTOPLYSNINGER

Kontakt en af nedenstående adresser for service, support, eller hvis du har andre spørgsmål.

### 4.1 Producentens kontaktoplysninger



**Hovedkontor**  
**Hermes Medical Solutions AB**  
Strandbergsgatan 16  
112 51 Stockholm  
SVERIGE  
Tlf.: +46 (0) 819 03 25  
www.hermesmedical.com

**Generel e-mailadresse:**  
info@hermesmedical.com

**E-mailadresse til support:**  
support@hermesmedical.com  
support.ca@hermesmedical.com  
support.us@hermesmedical.com

### 4.2 Repræsentanter

#### Autoriserede repræsentanter

**Ansvarlig person i Storbritannien**  
Hermes Medical Solutions Ltd  
Cardinal House  
46 St. Nicholas Street  
Ipswich, IP1 1TT  
England, Storbritannien

#### Schweizisk autoriseret

**repræsentant**

CH	REP
----	-----

  
CMI-eksperter  
Grellinger Str. 40  
4052 Basel  
Schweiz

### 4.3 Datterselskaber

**Hermes Medical Solutions Ltd**  
7-8 Henrietta Street  
Covent Garden  
London WC2E 8PS, Storbritannien  
Tlf.: +44 (0) 20 7839 2513

**Hermes Medical Solutions, Inc**  
2120 E. Fire Tower Rd, #107-197  
Greenville, NC27858  
USA  
Tlf.: +1 (866) 437-6372

**Hermes Medical Solutions Canada, Inc**  
1155, René-Lévesque O., Suite 2500  
Montréal (QC) H3B 2K4  
Canada  
Tlf.: +1 (877) 666-5675  
Fax: +1 (514) 288-1430

**Hermes Medical Solutions Germany GmbH**  
Robertstraße 4  
48282 Emsdetten  
Tyskland  
Tlf.: +46 (0)819 03 25